





# KITETT MINIKIT



- Mettez bien le **mamelon au centre de la téterelle**.
- **Activez le tire-lait** en appuyant sur le bouton .
- Le tire-lait MINIKIT DUO fonctionne avec **plusieurs niveaux** de réglages qui s'affichent graduellement à droite ou à gauche de l'écran. Pour **passer d'un niveau à l'autre**, **appuyez sur les boutons**  ou .
- Les **niveaux 1 à 4** correspondent à la **phase de stimulation** (cadence rapide, aspiration faible). Cette phase doit **durer environ 2 minutes**.
- Les **niveaux 5 à 9** correspondent à la **phase d'expression** (cadence de plus en plus lente, puissance d'aspiration de plus en plus forte), ajustez la **position à votre convenance** en fonction du confort ressenti.
- **Il ne faut pas que ce soit douloureux**.
- Veillez à **vérifier le bon écoulement** du lait à **l'intérieur du récipient de collecte**.
- En fin d'expression, **éteignez le tire-lait** en appuyant sur le bouton .