



# SPECTRA S1



Appuyer sur le bouton marche/arrêt  
Le Tire-lait s'allume directement en  
mode expression 

Passer en mode **stimulation** en  
appuyant sur le **bouton avec le  
petite vague**

Quand votre lait commence a sortir  
**réappuyé** dessus pour le faire **passer  
en expression** 

Réappuyer sur le bouton **marche/arrêt**  
pour éteindre le tire-lait 

**Cycle** = Fréquence du mouvement du  
mamelon

**Vaccum** = Puissance du mouvement du  
mamelon

Ajuster le cycle et le vaccum avec le  
plus et le moins  

**Important : il ne faut pas que ce soit  
douloureux.**

Bouton veilleuse 